

ALGOSTERIL compres stéril

Formes et présentations

Compresse et mèche stériles, sous emballage individuel :

Présentations	Dimensions	Nombre d'unités/boîte	Code ACL
Algostérial compresse	10 cm × 20 cm	16	3401077999407
	10 cm × 10 cm	16	3401077999575
	5 cm × 5 cm	10	3401073757087
Algostérial mèche plate	40 cm	16	3401096413151
Algostérial mèche ronde	30 cm	16	3401096413090

Composition

Fibres d'alginate de calcium (origine végétale) sous forme non tissée.

Propriétés

Cicatrisant hémostatique qui diminue le risque infectieux.

Indications

Hémostase :

- Suintements hémorragiques en nappe per et post-opératoires.
- Plaies hémorragiques.
- Hémostase des points de ponction.
- Épistaxis et saignements après chirurgie rhinosinusienne (mèche uniquement).

Cicatrisation :

- Plaies infectées et à haut risque infectieux.
- Plaies chroniques.
- Plaies chirurgicales et traumatiques.
- Plaies profondes/cavitaires.
- Brûlures superficielles et profondes.

Algostérial est efficace chez les patients présentant des troubles de l'hémostase congénitaux ou acquis (antiagrégants plaquettaires, antivitamines K ou héparine).

Algostérial peut être utilisé en interface aux systèmes TPN (traitement par pression négative).

Mode d'emploi

Hémostase :

- Appliquer Algosténil sec ou humidifié uniquement avec une solution de NaCl à 0,9 %.
- Maintenir Algosténil en place jusqu'à l'arrêt du saignement (au minimum 5 minutes). Si Algosténil est rapidement gorgé de sang, un renouvellement peut être nécessaire.
- Lors de l'hémostase peropératoire : retirer Algosténil avant de fermer le site chirurgical.

Méchage endonasal :

- Juste avant son application, humidifier Algosténil mèche uniquement avec une solution de NaCl à 0,9 % et l'essorer.
- Introduire la mèche le long du plancher nasal jusqu'à la choane. Tasser la mèche en accordéon.
- Bloquer l'extrémité sortante de la mèche dans le vestibule nasal pour éviter toute possibilité de migration.
- En cas d'ethmoïdectomie, mécher uniquement les deux tiers inférieurs de la fosse nasale.
- Démécher Algosténil 48 heures après la pose, en prenant soin de saisir la totalité de l'extrémité de la mèche (pour un retrait d'un seul tenant).

Algosténil peut être utilisé avec la lidocaïne-naphazoline et une solution de NaCl à 2,3 %.

Cicatrisation :

- Nettoyer la lésion (cf Interactions).
- En cas de lésion moyennement exsudative, ou de picotement, humidifier Algosténil. Utiliser uniquement une solution de NaCl à 0,9 %.

Solution de NaCl à 0,9 %	Présentation
10 ml	10 cm × 10 cm
20 ml	10 cm × 20 cm, mèche ronde, mèche plate

- Appliquer Algosténil.
En cas de méchage : introduire la mèche d'Algosténil dans la cavité sans la tasser. Pour les cavités à orifice étroit, humidifier la mèche d'Algosténil uniquement avec une solution de NaCl à 0,9 %, puis la torsader avant son introduction dans la cavité. Laisser dépasser au minimum 2 à 3 cm de l'orifice.
- Recouvrir Algosténil d'un pansement secondaire.
- Retirer Algosténil au maximum 48 heures après la pose. Pour un retrait indolore, humidifier Algosténil uniquement avec une solution de NaCl à 0,9 %.
- Renouveler Algosténil selon le type de plaie :

Type de plaie	Fréquence de renouvellement
Infectée	2 fois par jour jusqu'à disparition des signes locaux d'infection
Exsudative ou fibrineuse	1 fois par jour
Propre	Tous les 2 jours

La prise en charge de la plaie avec Algostérial compresse/mèche peut être poursuivie au-delà de 3 mois.

Les éventuelles fibres gélifiées, restantes après le retrait d'Algostérial, se dégraderont lors du nettoyage de la plaie.

Conditions particulières d'utilisation :

Algostérial peut rester en place sur la plaie lors des séances en caisson hyperbare.

Algostérial peut être utilisé en contact avec l'os.

Algostérial peut être utilisé avec la bétaméthasone.

Interface des systèmes TPN :

Application :

- Tapisser la totalité de la surface de la plaie avec Algostérial.
- Mettre en place le système TPN selon les recommandations du fabricant.

Retrait (à 48 heures maximum) :

- Retirer le système TPN selon les instructions du fabricant.
- Retirer Algostérial 48 heures maximum après la pose.

Contre-indications

Aucune connue à ce jour.

Précautions d'emploi

Mises en garde :

Toujours utiliser Algostérial compresse/mèche dans son intégralité.

Algostérial doit être retiré avant la fermeture du site chirurgical.

Méchage endonasal : Algostérial doit être retiré 48 heures après la pose.

Dans l'état actuel des connaissances, Algostérial ne doit pas être mis en contact avec le cœur et le cerveau.

Algostérial doit être retiré lors des séances de radiothérapie.

Usage unique : ne pas réutiliser en raison d'un risque de contamination microbienne et de perte de performance.

Précautions d'emploi :

En cas d'humidification d'Algostérid, utiliser uniquement une solution de NaCl à 0,9 % : les ions Na⁺ de la solution NaCl s'échangent avec les ions Ca²⁺ d'Algostérid, ce qui permet la gélification et le retrait indolore d'Algostérid.

Vérifier l'intégrité du sachet avant l'utilisation du produit.

Renouveler Algostérid au maximum toutes les 48 heures.

En cas d'utilisation d'Algostérid en interface aux systèmes TPN, respecter la notice d'utilisation du fabricant du dispositif TPN.

Interactions :

Algostérid ne doit pas être utilisé avec les solutions alcalines, telles les solutions d'hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine, du chlorure de benzalkonium ou des sels de cuivre.

Si de tels produits sont utilisés sur la plaie, rincer abondamment et uniquement avec une solution de NaCl à 0,9 % avant d'appliquer Algostérid.

Stérilisation :

Produit stérile, stérilisé par rayonnement β. Ne pas restériliser.

Conditions de conservation

Conserver dans un endroit sec à une température inférieure à 30 °C et à l'abri de la lumière. Respecter la date limite d'utilisation.

Renseignements administratifs

Marquage CE 0459 (obtention en 1999).

Données administratives

ALGOSTERIL Compr 5x5cm B/10

COMMERCIALISÉ

Code ACL7375708

Code 133401073757087

Labo. DistributeurBrothier

Code LPPR	Désignation	Code prestation	Nature prestation	Type de prestation	Base de remboursement (Euros)
1365465	PANSEMENTS DALGINATE DE CA PUR, 25 CM2, BROTHIER, ALGOSTERIL, BOITE DE 10.	PAN	pansements	Achat	-

ALGOSTERIL Compr stérile 10x10cm B/16

COMMERCIALISÉ

Code ACL7799957

Code 133401077999575

Labo. Distributeur Brothier

Code LPPR	Désignation	Code prestation	Nature prestation	Type de prestation	Base de remboursement (Euros)
1394521	PANSEMENTS DALGINATE DE CA PUR, 100 CM2, BROTHIER, ALGOSTERIL, BOITE DE 16.	PAN	pansements	Achat	-

ALGOSTERIL Compr stérile 10x20cm B/16

COMMERCIALISÉ

Code ACL7799940

Code 133401077999407

Labo. Distributeur Brothier

Code LPPR	Désignation	Code prestation	Nature prestation	Type de prestation	Base de remboursement (Euros)
1371253	PANSEMENTS DALGINATE DE CA PUR, 200 CM2, BROTHIER, ALGOSTERIL, BOITE DE 16.	PAN	pansements	Achat	-

Vidal