

Besoin d'aide ?

Pour plus d'informations, consulter le site [www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com)  
Le lecteur est préconfiguré et verrouillé pour afficher les résultats en mg/dL. Si les résultats sont exprimés en mmol/L, contactez le Service Clientèle.

Importé et distribué par :  
Ascensia Diabetes Care France SAS  
CS20073  
20/26 Boulevard du Parc  
92521 Neuilly sur Seine CEDEX  
France  
0 800 34 22 38 Service à appel gratuit

Importé et distribué par :  
Ascensia Diabetes Care NV-SA  
Pegasuslaan 5  
BE-1831 Diegem (Machelen)  
Tél. 0800 97 212 (BE)  
Tél. 800 27 254 (LUX)  
info@ascensia-diabetescare.be

Destiné à un usage de diagnostic in vitro.  
Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care, Contour, Microlet, le logo No Coding (Sans Codage), Second-Chance, le logo de la fonction Second-Chance sampling, Smartcolour et Smartlight sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.  
Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.  
La marque et les logos du mot Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Ascensia Diabetes Care est soumise à une licence.  
Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.  
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif. Aucune relation ou aucune recommandation ne doit être déduite ou suggérée.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Merian-Strasse 90  
4052 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.  
Via Varesina, 162  
20156 Milano, Italy

ASCENSIA  
Diabetes Care



© 2024 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.  
Tous droits réservés.

90012612  
Rev. 04/24

Contour®  
next<sup>1)</sup>

Système d'autosurveillance glycémique

Fonctionne avec l'application gratuite  
CONTOUR®DIABETES

Vérifiez si vous pouvez enregistrer votre  
lecteur de glycémie en ligne sur  
[www.diabetes.ascensia.com/registration](http://www.diabetes.ascensia.com/registration)

FR

10:45 12.4

93

mg/dL

OK

Réapplication de  
sang possible

NO CODING  
SANS CODAGE

MANUEL D'UTILISATION SIMPLIFIÉ

Fonctionne uniquement avec  
les bandelettes réactives  
CONTOUR®NEXT.

Le lecteur de glycémie  
CONTOUR NEXT

**REMARQUE :** Votre lecteur de glycémie affiche une heure, une date et un intervalle cible prédéfinis. Vous pouvez modifier ces réglages dans les Paramètres.

**REMARQUE :** Le lecteur de glycémie CONTOUR NEXT fonctionne exclusivement avec les bandelettes réactives CONTOUR NEXT et la solution de contrôle CONTOUR NEXT.

Consultez le manuel d'utilisation CONTOUR NEXT pour obtenir des informations sur l'utilisation prévue du lecteur de glycémie, les informations de sécurité importantes, les avertissements, les restrictions et les précautions d'utilisation.

Allumer et éteindre le lecteur de glycémie

- Appuyer et maintenir enfoncée la touche **OK** pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le lecteur de glycémie s'allume ou s'éteigne.
- Insérer une bandelette réactive dans le lecteur de glycémie pour l'allumer également.
- Appuyer deux fois sur **OK** quand le lecteur de glycémie est éteint pour allumer le voyant blanc du port d'insertion de la bandelette réactive.

Écran d'Accueil

L'écran d'Accueil comporte 2 options : **Mes résultats** et **Paramètres**.

- Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que l'option désirée clignote.
- Pour afficher vos résultats et moyennes précédents, appuyez sur la touche **OK** lorsque le symbole **Mes résultats** clignote. Voir **Mes résultats** et **Afficher les Moyennes**.
- Pour modifier vos Paramètres, appuyez sur la touche **OK** lorsque le symbole **Paramètres** clignote. Voir **Paramètres**.

Pour consulter le tableau des symboles, voir **Écran du lecteur de l'autre côté**.

**REMARQUE :** Si un symbole clignote, vous pouvez le sélectionner.

Test au bout du doigt

Consultez la notice d'utilisation de l'autopiqueur pour obtenir des instructions détaillées sur sa préparation.

ATTENTION

Risques biologiques potentiels

- Toujours se laver les mains avec de l'eau savonneuse et bien les sécher avant et après le test, la manipulation du lecteur de glycémie, de l'autopiqueur ou des bandelettes réactives.
- Tous les systèmes d'autosurveillance glycémique sont considérés comme présentant des risques de contamination biologique. Les professionnels de santé ou les personnes utilisant ce système sur différents patients doivent respecter les procédures de contrôle des risques d'infection en vigueur dans leur établissement pour la prévention des maladies transmissibles par le sang.
- L'autopiqueur (quand fourni dans le set) est destiné à l'autosurveillance glycémique par un seul patient. Il ne doit pas être utilisé sur plus d'une personne afin d'éviter tout risque d'infection.

Petites pièces

- Tenir hors de portée des enfants. Cet ensemble contient de petites pièces, susceptibles de provoquer un étouffement si elles sont accidentellement avalées.
- Conserver les piles hors de la portée des enfants. Divers types de piles sont toxiques. En cas d'ingestion, contacter immédiatement un centre antipoison.

- Préparer l'autopiqueur. Consulter la notice d'utilisation de l'autopiqueur pour des instructions détaillées.
- Insérer fermement l'extrémité carrée grise d'une nouvelle bandelette réactive dans le port d'insertion jusqu'à l'émission d'un signal sonore par le lecteur de glycémie.

Le lecteur de glycémie s'allume et affiche l'écran **Appliquer du sang**. Le lecteur de glycémie est maintenant prêt pour la réalisation du test avec une goutte de sang.

- Utiliser l'autopiqueur pour obtenir une goutte de sang au bout du doigt.
- Masser la main et le doigt aux abords du site de prélèvement pour obtenir une goutte de sang.
- Mettre immédiatement l'extrémité de la bandelette réactive au contact de la goutte de sang.

Fonction Second-Chance sampling (Réapplication de sang possible)

Si le lecteur de glycémie émet deux signaux sonores et si l'écran affiche une goutte de sang qui clignote avec le symbole "+", la bandelette réactive n'a pas absorbé suffisamment de sang.

Ne pas retirer la bandelette. Vous avez 60 secondes pour appliquer plus de sang sur la même bandelette.

00:60

+

Marqueurs de repas

Si la fonction Marqueurs de repas est activée, vous pouvez marquer des résultats comme **À jeun**, **Avant repas** ou **Après repas**. Voir **Activer les Marqueurs de repas**.

Indicateur lumineux d'intervalle cible smartLIGHT

Le lecteur de glycémie affiche votre résultat avec les unités, l'heure, la date et l'indicateur lumineux de l'intervalle cible :

3

4

5

Le voyant lumineux du port d'insertion de la bandelette réactive émet une lumière de couleur qui indique si votre résultat est supérieur, dans ou inférieur à votre intervalle cible personnel.

### Mes résultats


1. Pour allumer le lecteur de glycémie, appuyer et maintenir enfoncée la touche **OK** pendant 3 secondes.



Le symbole **Mes résultats**  (clignote).

2. Pour afficher les données du **Mes résultats**, appuyer sur la touche **OK** de sorte à y entrer.
3. Pour défiler dans le **Mes résultats**, appuyer sur la touche **▲** ou **▼**. Pour faire défiler rapidement les résultats, appuyer et maintenir enfoncée la touche **▲** ou **▼**.
4. Pour quitter le **Mes résultats** et retourner à l'écran d'**Accueil** à tout moment, appuyer sur la touche **OK**.

### Afficher les Moyennes

1. Pour accéder au **Mes résultats** depuis l'écran d'**Accueil**, appuyer sur la touche **OK** lorsque le symbole **Mes résultats**  clignote.
2. Pour afficher vos Moyennes, appuyez sur la touche **▲** depuis le **premier** écran du **Mes résultats**.

3. Pour faire défiler vos moyennes de 7, 14, 30 et 90 jours, appuyez sur la touche **▲**.

4. Pour retourner à vos résultats, appuyez sur la touche **▼** de votre **7 d Avg** (moyenne de 7 jours).




5. Pour quitter les Moyennes et retourner à l'écran d'**Accueil** à tout moment, appuyer sur la touche **OK**.



### Paramètres

**Vous pouvez modifier les paramètres suivants :**

- **Date** : Changer le format et la date.
- **Heure** : Changer le format et l'heure.
- **Marqueurs de repas**    : Activer ou désactiver les Marqueurs de repas.
- **Technologie sans fil Bluetooth**  : Activer ou désactiver la fonction sans fil Bluetooth.
- **Fonction Indicateur lumineux smartLIGHT**  : Activer ou désactiver la fonction indicateur lumineux smartLIGHT. Voir *Indicateur lumineux d'intervalle cible smartLIGHT*.

- **Intervalles cibles**  : Afficher et modifier les Intervalles cibles.
- **Signal sonore**  : Activer ou désactiver le Signal sonore.
- **Rappel**  : Activer ou désactiver la fonction Rappel.

**REMARQUE** : Pour modifier l'heure et la date du lecteur, voir le manuel d'utilisation.

**Pour modifier les paramètres du lecteur de glycémie :**

1. Pour sélectionner le symbole **Paramètres**  depuis l'écran **Accueil**, appuyer sur la touche **▼**.
2. Quand le symbole **Paramètres**  clignote, appuyer sur la touche **OK** pour accéder aux **Paramètres**.



*Suite des Paramètres à la page suivante ➡*

